

B. L'UTILISATION DU FICHIER AU JOUR LE JOUR

LA DATE

REGISTRE DE TRAÇABILITÉ de la STÉRILISATION												
DATE	Autoclave	OPERATEUR	TESTS			MAINTENANCE		Une colonne au choix			REFERENCE à reporter fiche patient	PEREMPTION STERILISATION
			BOWIE DICK	HELIX	TICKET MACHINE	FILTRE	JOINT PORTE	Numéro de CYCLE 134° /jour	N° Cycle machine	Nombre sachets		
01/06/22	A	AM							20	26	A / AM / 152 / / 20	30-juil.
03/06/23									21		/ / 154 / / 21	1-août
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.

Dans la colonne DATE, remplir la date du jour sous le format jour/mois ou 01/01.

Inutile de préciser l'année.

L'AUTOCLAVE

REGISTRE DE TRAÇABILITÉ de la STÉRILISATION												
DATE	Autoclave	OPERATEUR	TESTS			MAINTENANCE		Une colonne au choix			REFERENCE à reporter fiche patient	PEREMPTION STERILISATION
			BOWIE DICK	HELIX	TICKET MACHINE	FILTRE	JOINT PORTE	Numéro de CYCLE 134° /jour	N° Cycle machine	Nombre sachets		
01/06/22	A	AM							20	26	A / AM / 152 / / 20	30-juil.
03/06/23									21		/ / 154 / / 21	1-août
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.

Cliquer dans la cellule en regard de celle de la date (flèche verte) et aussitôt apparaît un menu déroulant indiqué par la flèche rouge ; en cliquant dessus apparaîtra une liste de choix (pour l'exemple A, B, C.) - choisir la lettre qui correspond à votre machine.

L'OPERATEUR

REGISTRE DE TRAÇABILITÉ de la STÉRILISATION												
DATE	Autoclave	OPERATEUR	TESTS			MAINTENANCE		Une colonne au choix		Nombre sachets	REFERENCE à reporter fiche patient	PEREMPTION STERILISATION
			BOWIE DICK	HELIX	TICKET MACHINE	FILTRE	JOINT PORTE	Numéro de CYCLE 134° /jour	N° Cycle machine			
01/06/22	A	AM	*						20	26	A / AM / 152 / / 20	30-juil.
03/06/23									21		/ / 154 / / 21	1-août
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.

De la même façon,

1 cliquer dans la cellule indiquée par la **flèche verte**

2 cliquer sur la petite flèche indiquée par la **ligne rouge** et choisir les initiales voulues.

TESTS et MAINTENANCE

Les trois colonnes TESTS (Bowie Dick, Helix, test machine) permettent selon le même processus de choix par menu déroulant d'indiquer « OUI » dans la cellule si un test a été réalisé

Idem pour MAINTENANCE il est possible d'indiquer si un joint ou un filtre a été changé.

NUMÉRO DE CYCLE

Un cycle de stérilisation correspond à un traitement de dispositifs quel que soit le nombre de sachets chargés dans la cuve de l'autoclave. Il peut être réalisé dans une seule et même journée 1 voire 2 ou 3 cycles de stérilisations . Choisir selon le principe du menu déroulant le nombre 1 , 2 ou 3,...

NUMÉRO DE CYCLE machine

Si votre autoclave dispose d'une imprimante et vous délivre à la fin de chaque utilisation un ticket, un numéro de cycle est indiqué sur celui-ci. Dans ce cas , ayant pris le soin lors de la première utilisation

de ce fichier de renseigner le numéro du cycle pris en considération dans la rubrique paramétrage, cette colonne se renseigne automatiquement.

NOMBRE de SACHETS

Il convient de remplir MANUELLEMENT le nombre de sachets déposés dans la cuve pour le cycle numéroté 1, 2 ou 3

REFERENCE À REPORTER sur la fiche patient

Cette référence (colonne en vert) se remplit automatiquement.

La référence se décompose comme suit :

- A = indentation de l'autoclave
- PL = initiales de l'opérateur
- 1 ou 2 ou 119... correspond à la date indiquée (numéro du jour de 1 à 365)
- 1 ou 2 ou... correspond au numéro de cycle .

ou

- Numéro du cycle machine

PÉREMPTION STÉRILISATION

Selon la date de la stérilisation de vos DM, la date de fin de l'état stérile de vos sachets est automatiquement indiquée dans la dernière colonne. (Une période de 2 mois est considérée comme maximale pour le maintien parfait de l'état de stérilité sous sachet)

Cette colonne est présente pour vous permettre de détenir un stock d'instruments sous sachets dans des conditions satisfaisantes.

REMARQUE IMPORTANTE

Pour assurer efficacement la traçabilité de la stérilisation, vous devez, à la fin du cycle de stérilisation, au sortir de la cuve :

- 1) Reporter sur chaque sachet la REFERENCE indiquée dans la colonne verte
- 2) Reporter également un NUMÉRO de 1 à x selon le nombre de sachets traités pour le cycle considéré.

Vous aurez donc sur chaque sachet une référence du type **A/AM/152/20/ x** en prenant pour exemple l'opération du 01/06/2022.

Dans la fiche de votre patient lors d'un soin, il suffit de reporter les références du ou des sachets utilisés en regard de la date du soin. Cette mention peut être intégrée , quel que soit le logiciel utilisé, dans une zone « commentaire » qui permet l'intégration d'un texte libre.

Lors de la réalisation de tests il est impératif de garder la trace datée de ceux-ci .

REGISTRE DE TRAÇABILITÉ de la STÉRILISATION												
DATE	Autoclave	OPERATEUR	TESTS			MAINTENANCE		Une colonne au choix		Nombre sachets	REFERENCE à reporter fiche patient	PEREMPTION STERILISATION
			BOWIE DICK	HELIX	TICKET MACHINE	FILTRE	JOINT PORTE	Numéro de CYCLE 134° /jour	N° Cycle machine			
01/06/22	A	AM							20	26	A / AM / 152 / / 20	30-juil.
03/06/23									21		/ / 154 / / 21	1-août
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.
											/ / 0 / /	29-févr.

Ainsi vous répondez à vos obligations en termes de traçabilité et pourrez apporter les preuves exigées en cas de mise en cause par des tiers.